

Final CE Master Text (cSLT)

PACKAGE INSERT

AOSEPT[^] PLUS

Peroxyde d'hydrogène 3%

Solution nettoyante et décontaminante

avec HydraGlyde*



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION DU PRODUIT EN TOUTE SECURITE. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT. UN ENTRETIEN INCORRECT DE VOS LENTILLES PEUT CAUSER DE GRAVES PROBLEMES OCULAIRES

AOSEPT[^] PLUS avec la matrice hydratante HydraGlyde* est un système d'entretien pour le nettoyage, la décontamination, la neutralisation, la déprotéinisation et la conservation de tous types de lentilles de contact y compris en silicone-hydrogel. Le système AOSEPT PLUS comprend : la solution AOSEPT PLUS de nettoyage et de décontamination avec la matrice hydratante HydraGlyde (voir image 1) et l'étui de trempage (voir image 2). L'étui de trempage AOSEPT PLUS se compose d'un étui transparent et d'un ensemble capuchon à vis, de deux paniers porte-lentilles, et du disque-neutralisant AODISC[^] fixé en bas. Assurez-vous que l'AODISC est fixé avant utilisation, car il est essentiel pour la neutralisation du peroxyde d'hydrogène. La solution AOSEPT PLUS et l'étui de trempage doivent toujours être utilisés ensemble. La solution aqueuse sans conservateur AOSEPT PLUS avec la matrice hydratante HydraGlyde contient : 3 % de peroxyde d'hydrogène de l'acide phosphonique (stabilisateur), du chlorure de sodium, du phosphate (système tampon), du poloxamère (surfactant), avec la matrice hydratante HydraGlyde* (EOBO-21* – polyoxyéthylène-polyoxybutylène).



Fabriqué selon un procédé aseptique.

MODE D'EMPLOI


- 1. Lavez-vous les mains et séchez-les avec une serviette propre.**
- 2. Ouvrez le panier marqué "L" et placez votre lentille gauche sur la partie bombée. Refermez le panier en prenant soin de ne pas pincer la lentille.**
- 3. Répétez l'opération avec votre lentille droite sur la partie bombée de l'autre panier marqué "R".**
- 4. Ouvrez le haut du capuchon du flacon d'AOSEPT PLUS puis pliez-le en arrière et à l'écart.**

5. Rincez abondamment les lentilles placées dans les paniers avec AOSEPT PLUS pendant 5



secondes (voir image 3).

6. Remplissez l'étui avec la solution AOSEPT PLUS jusqu'au trait-repère, NI AU-DESSUS NI EN-DESSOUS (voir image 4).

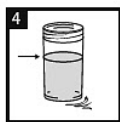


7. Placez le panier dans l'étui AOSEPT PLUS et fermez-le. Ne pas agiter l'étui.

8. Conservez l'étui en position vertical (voir image 5).



- Si des bulles s'échappent par l'orifice du couvercle, il se peut qu'il reste de la solution AOSEPT PLUS non neutralisée. Videz la solution de l'étui de trempage et nettoyez la solution qui aurait débordé sur la surface où était posé l'étui de trempage AOSEPT PLUS. Rincez abondamment l'étui et le panier porte-lentilles AOSEPT PLUS avec de la solution saline stérile. Si de la solution déborde, nettoyez immédiatement avec une serviette en papier. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles ou de toucher vos yeux. REPETEZ L'OPERATION DE DECONTAMINATION CI-DESSUS.

9. Laissez les lentilles tremper 6 heures minimum ou toute la nuit pour neutraliser la solution

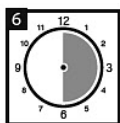


(voir image 6).

10. Retirez vos lentilles du panier porte-lentilles.

11. Vos lentilles sont maintenant prêtes à être portées.

12. Jetez la solution usagée, rincez l'étui AOSEPT PLUS et le panier porte-lentilles avec une solution saline stérile. NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET OU DE L'EAU NON STERILE.

13. Laissez les sécher à l'air libre en retournant le porte-lentilles en dehors de l'étui (voir image 7).

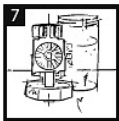

14. Si vous n'avez pas l'intention de porter vos lentilles immédiatement après l'étape de décontamination/neutralisation, vous pouvez les conserver jusqu'à 14 jours dans la solution AOSEPT PLUS neutralisée dans l'étui non ouvert. Au-delà de cette période, vos lentilles doivent être nettoyées et décontaminées à nouveau avec AOSEPT PLUS avant d'être portées.


Selon les recommandations de votre ophtalmologiste, vous pouvez rincer vos lentilles avant la pose avec une solution saline.


CONTRE-INDICATIONS (raisons de ne pas utiliser)


- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants.
- Ne jamais utiliser AOSEPT PLUS pour la décontamination thermique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Vérifiez que la bague de sécurité du flacon est intacte avant la première utilisation. Ne pas utiliser dans le cas contraire.
- Refermez le flacon après utilisation.
- Une fois le flacon ouvert, jetez toute solution restante après 3 mois 
- Ne jamais mettre l'embout du flacon au contact d'une autre surface, ceci pourrait contaminer la solution.
- Utilisez toujours le nouvel étui de trempage fourni avec chaque flacon de solution AOSEPT[^] PLUS

- Conservez à une température inférieure à 25°C 
- Utilisez toujours la solution AOSEPT PLUS entre 15°C et 25°C, la neutralisation pouvant durer plus de 6 heures en dessous de 15°C.

- Conservez à l'abri de la lumière directe du soleil. 
- Consultez votre ophtalmologiste avant de changer de solution d'entretien.

MISES EN GARDE

- NE JAMAIS TENTER DE NETTOYER OU RINCER VOS LENTILLES DE CONTACT DANS VOS MAINS AVEC LA SOLUTION **AOSEPT PLUS**. UNE DECOLORATION TEMPORAIRE DE LA PEAU (BLANCHIEMENT) PEUT SE PRODUIRE AU CONTACT DE LA SOLUTION NEUTRALISEE.
- NE JAMAIS TENTER DE NETTOYER VOS LENTILLES AVEC UN AUTRE NETTOYANT CAR SES RESIDUS VONT MOUSSER CE QUI FERA DEBORDER L'ETUI.
- **La couleur rouge du bouchon à visser signifie : Ne jamais mettre la solution AOSEPT PLUS**



non neutralisée directement dans l'œil

- **N'UTILISEZ QUE L'ETUI AOSEPT PLUS FOURNI. N'UTILISEZ AUCUN AUTRE ETUI DE TREMPAGE.**
- **Assurez-vous toujours que vos lentilles trempent dans l'étui à lentille prévu à cet effet depuis au moins 6 heures (durée nécessaire à la neutralisation) avant de les poser. LA SOLUTION AOSEPT PLUS NON NEUTRALISEE EST UN PUISSANT DECONTAMINANT QUI PROVOQUERA UNE SENSATION DE BRULÛRE si elle entre en contact avec l'œil. Si vous posez accidentellement une lentille non neutralisée, enlevez-la immédiatement et rincez-vous abondamment l'œil ouvert, avec de l'eau stérile ou une solution saline stérile. Décontaminez de nouveau votre lentille avant de la remettre.**

- Utilisez toujours une nouvelle quantité de solution AOSEPT PLUS- Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage une seconde fois, son efficacité n'étant alors plus assurée.



- Ne JAMAIS transvaser AOSEPT PLUS dans un autre récipient
- Ne JAMAIS diluer ou mélanger AOSEPT PLUS avec n'importe quelle autre solution, ceci

annulerait son efficacité.

- NE JAMAIS METTRE VOS LENTILLES AU CONTACT DE LIQUIDES NON STERILES (Y COMPRIS L'EAU DU ROBINET ET LA SALIVE) CAR UNE CONTAMINATION MICROBIENNE PEUT SE PRODUIRE, CE QUI POURRAIT CONDUIRE A DES LESIONS OCULAIRES DEFINITIVES.



- TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

- En cas d'ingestion de la solution AOSEPT PLUS non neutralisée buvez immédiatement une grande quantité d'eau et consultez votre médecin.

- Consultez votre médecin ou votre ophtalmologiste avant de prendre des médicaments pendant le port des lentilles.

EFFETS INDESIRABLES

En cas de sensation persistante d'inconfort ou d'irritation, retirez vos lentilles, interrompez l'utilisation du produit et consultez votre ophtalmologiste.

PRESENTATIONS

AOSEPT[^] PLUS avec la matrice hydratante HydraGlyde*, stérilisé par filtration, est disponible en tailles 90 mL et 360 mL. Un étui de trempage avec AODISC[^] est fourni avec chaque flacon d'AOSEPT PLUS avec HydraGlyde.



Fabricant

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, Etats-Unis

CE 0123



Mandataire dans l'UE

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Royaume-Uni

Distribué par:
{si besoin}

Date d'élaboration:
{si besoin}

* Une marque de Novartis

^ Une marque de American Optical

© 2014 Novartis