

BAUSCH+ LOMB BOSTON ADVANCE™ Cleaner

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET LA CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

Spécialement recommandée pour nettoyer les lentilles en fluoro silicone acrylate et les lentilles rigides perméables aux gaz en silicone acrylate.

DESCRIPTION: L' utilisation quotidienne de la solution BOSTON ADVANCE Nettoyage permet d'éliminer les dépôts de protéines, lipides et les débris qui se forment sur les lentilles rigides perméables aux gaz. A utiliser spécialement avec BOSTON ADVANCE Formule Confort Solution de Conservation.

COMPOSITION: Principe actif: sulphate d'alkyl éther (8.0 % w/v). Autres composants : chlorure de sodium, phosphate de sodium, alcool surfactant non ionique, suspension de gel de silice ; avec du dioxyde de titane.

DIRECTIONS:

ETAPE 1. Se laver soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles

ETAPE 2. Dans la paume de la main, masser doucement chaque face de la lentille avec quelques gouttes de Boston Advance Solution de Nettoyage pendant 20 secondes.

ETAPE 3. ELIMINER LA SOLUTION DE NETTOYAGE EN LA RINÇANT SOIGNEUSEMENT AVEC UNE SOLUTION DE RINÇAGE COMME INDIQUÉ PAR VOTRE SPÉCIALISTE.

ETAPE 4. Mettre vos lentilles dans l'étui et immerger chaque lentille dans une solution de conservation neuve. Immerger les lentilles au moins durant 4 heures (ou la nuit) avant de les porter.

SI LA SOLUTION EST ACCIDENTELLEMENT APPLIQUÉE DANS L'OEIL, RETIRER VOS LENTILLES ET RINCER IMMÉDIATEMENT VOS YEUX À L'EAU COURANTE JUSQU'À CE QUE LE PRODUIT SOIT COMPLÈTEMENT ÉVACUÉ. EN CAS D'INCONFORT DE L'OEIL, DE LARMOIEMENT EXCESSIF, DE CHANGEMENT DE VOTRE VISION OU DE ROUGEUR DE L'OEIL, ENLEVER IMMÉDIATEMENT VOS LENTILLES ET CONTACTER RAPIDEMENT VOTRE SPÉCIALISTE.

PRECAUTIONS:

Pour assurer une bonne hygiène et manipulation des lentilles et des produits d'entretien, toujours suivre soigneusement les instructions

- Ne jamais utiliser la solution de conservation usagée.
- TOUJOURS IMMERGER VOS LENTILLES DANS UNE SOLUTION DE CONSERVATION. NE JAMAIS LAISSER TREMPER OU STOCKER VOS LENTILLES DANS LA SOLUTION DE NETTOYAGE BOSTON ADVANCE.

TOUJOURS RINCER SOIGNEUSEMENT VOS LENTILLES (COMME INDIQUÉ PAR VOTRE SPÉCIALISTE) AVEC UNE SOLUTION DE RINÇAGE APRÈS LE NETTOYAGE AVEC LA SOLUTION DE NETTOYAGE BOSTON ADVANCE.

- Pour éviter toute contamination, ne jamais mettre en contact l'embout du flacon avec vos mains ou avec une surface quelconque.
- Garder le flacon fermé quand vous ne l'utilisez pas.
- Toujours se laver soigneusement les mains avant toute manipulation.
- Utiliser avant la date de péremption.

MISES EN GARDE:

CETTE SOLUTION NE DOIT PAS ÊTRE APPLIQUÉE DIRECTEMENT DANS L'OEIL

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

Ne pas utiliser au delà de la date de péremption.

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité du flacon est cassé ou manquant

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants.

Ne pas conserver la solution plus de 3 mois après son ouverture.

NE PAS UTILISER AVEC DES LENTILLES SOUPLES



Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston upon Thames, KT2 6TN, UK

CE 0050



Fabriqué en Italie

®/™ sont des marques commerciales de Bausch & Lomb incorporated ou ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated