

# F Oxysept 1 Etape/Comfort

Grâce à la technologie de comprimé à libération programmée, Oxysept 1 Etape/Comfort permet une décontamination et une neutralisation des lentilles de contact souples en une seule étape.

Toujours utiliser l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort spécialement conçu pour ce système.

## Mode d'emploi

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles de contact.
- Votre spécialiste vous conseillera si vous devez utiliser une solution de nettoyage complémentaire.
- Dans ce cas, bien rincer les lentilles avec une solution saline stérile, afin d'éliminer toute trace de solution de nettoyage et d'éviter une effervescence excessive.

### Décontamination et neutralisation

1. Placer les lentilles dans les paniers adéquats fixés sous le couvercle de l'étui (L pour la lentille gauche et R pour la lentille droite) et fermer les paniers, en prenant soin de ne pas pincer les lentilles.
2. Remplir l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort jusqu'au trait avec la solution de décontamination Oxysept 1 Etape/Comfort. Respecter cette limite. Ajouter ensuite le comprimé de neutralisation Oxysept 1 Etape/Comfort.
3. Remplacer le couvercle sur l'étui et revisser.
4. Après fermeture, retourner l'étui au minimum trois fois afin de vous assurer que tout l'intérieur de l'étui est décontaminé. S'assurer que le comprimé est bien dans la solution afin que la neutralisation puisse commencer.
5. Après quelques minutes, des bulles d'air se forment à la surface du comprimé et une effervescence peut apparaître. Une couleur rose pâle apparaîtra quand le comprimé commencera à se dissoudre. Ceci ne signifie pas que la neutralisation est terminée. Une solution incolore montre, soit qu'aucun comprimé n'a été ajouté, soit que le comprimé ne s'est pas dissout.
6. Pour un confort optimal, laisser tremper les lentilles toute la nuit. Si vous avez besoin d'un temps de décontamination et neutralisation plus rapide, s'assurer que les lentilles auront trempé 6 heures minimum après avoir ajouté le comprimé.
7. Avant de retirer les lentilles, retourner l'étui afin de garantir une neutralisation complète de l'intérieur de l'étui.
8. Les lentilles sont à présent décontaminées, neutralisées et prêtes à être portées. Jeter la solution utilisée de l'étui après avoir posé les lentilles sur les yeux. Rincer l'intégralité de l'étui avec une solution saline stérile (par ex., LENS PLUS OcuPure) et le laisser sécher.

### Conservation

- Si l'étui reste fermé, les lentilles peuvent y être conservées pendant sept jours maximum.
- Si vous les conservez dans l'étui pendant un délai plus long, effectuez le programme d'entretien quotidien (de l'étape 1 à l'étape 7) tous les sept jours, puis une nouvelle fois avant de mettre vos lentilles.

### ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

#### Déprotéinisation

- Au cours d'un port de lentilles normal, des protéines provenant du film lacrymal peuvent former un dépôt sur les lentilles de contact. Ce dépôt peut réduire le confort de port des lentilles, la vision et la durée de vie des lentilles.
- Lorsque nécessaire, l'utilisation hebdomadaire des comprimés de déprotéinisation Ultrazyme permet un entretien optimal pour les lentilles.
- Une fois par semaine, en plus du comprimé de neutralisation Oxysept 1 Etape/Comfort normal, ajouter un comprimé de déprotéinisation Ultrazyme à la solution de décontamination Oxysept 1 Etape/Comfort. La solution comporte alors deux comprimés.
- Puis suivre le programme d'entretien quotidien, de l'étape 3 à l'étape 7.
- Après l'utilisation d'un comprimé Ultrazyme, toujours masser et rincer les deux faces des lentilles avec une solution saline stérile (par ex., LENS PLUS OcuPure) avant de les poser sur les yeux. Rincer l'étui avec une solution saline stérile et le laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laisser les lentilles plus de 12 heures dans une solution contenant un comprimé de déprotéinisation Ultrazyme.

#### Nettoyage de l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort

Pour une hygiène optimale, nettoyer l'étui une fois par semaine de la façon suivante :

- Remplir l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort vide avec la solution Oxysept 1 Etape/Comfort et le fermer (ne pas ajouter de comprimé).
- Retourner l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort et le laisser tête en bas sur son couvercle pendant que vous portez vos lentilles (éviter tout contact avec des surfaces sensibles au peroxyde d'hydrogène).
- Vous pouvez utiliser la solution se trouvant dans l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort pour décontaminer vos lentilles. Y ajouter un comprimé de neutralisation, comme à l'habitude.

#### Précautions d'emploi

**Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies rigoureusement. Le non respect de ces instructions peut entraîner une infection ou une lésion oculaire grave.**

**Utiliser uniquement l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort spécialement conçu pour ce système afin de permettre à l'oxygène généré pendant la neutralisation de s'évacuer.**

#### Précautions générales

- Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente.
- Utiliser uniquement avec l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort spécialement conçu pour le système.
- Ne pas utiliser Oxysept 1 Etape/Comfort avec les lentilles rigides ou rigides perméables aux gaz.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- En cas d'irritation oculaire, enlever les lentilles et consulter un spécialiste.
- Toujours s'assurer que le comprimé de neutralisation Oxysept 1 Etape/Comfort (colorant la solution en rose pâle) s'est totalement dissout et que la formation de bulles s'est arrêtée avant de poser les lentilles sur les yeux. Si le comprimé de neutralisation Oxysept 1 Etape/Comfort ne s'est pas totalement dissout, renouveler les étapes de décontamination et de neutralisation.
- Ne pas réutiliser la solution neutralisée Oxysept 1 Etape/Comfort ou la solution saline stérile.
- Laisser tremper les lentilles dans la solution pendant 6 heures minimum après avoir ajouté le comprimé.
- Pour éviter tout risque de contamination, ne jamais toucher l'embout du flacon.
- Refermer hermétiquement le flacon immédiatement après usage.
- **Ne pas rincer les lentilles de contact ni l'étui Oxysept 1 Etape/ avec de l'eau du robinet.**

#### Précautions particulières d'utilisation

- **Ne jamais mettre la solution Oxysept 1 Etape/Comfort non neutralisée ou une solution contenant un comprimé de déprotéinisation Ultrazyme directement dans les yeux. Ne jamais mettre les lentilles de contact directement dans les yeux si celles-ci viennent d'être retirées de la solution Oxysept 1 Etape/Comfort non neutralisée ou d'une solution contenant un comprimé de déprotéinisation Ultrazyme. Si cela devait arriver, retirer immédiatement les lentilles et rincer les yeux avec de l'eau.**
- Ne pas avaler la solution ni les comprimés.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Les comprimés de neutralisation Oxysept 1 Etape/Comfort sont roses à aspect tacheté. Les comprimés de déprotéinisation Ultrazyme sont blancs à aspect tacheté. Ne pas utiliser de comprimés décolorés, mous, collants ou d'aspect irrégulier.
- Ne pas utiliser la solution LENS PLUS OcuPure pour une désinfection à froid.

#### Conditions de conservation

- À conserver à température ambiante, dans un endroit sec.
- Tenir hors de portée des enfants.

#### Élimination

- Jeter toute solution de décontamination Oxysept 1 Etape/Comfort restante 60 jours après l'ouverture initiale du flacon.
- Jeter toute solution saline LENS PLUS OcuPure restante 90 jours après l'ouverture initiale du flacon.
- Les étuis Oxysept 1 Etape/Comfort usagés doivent être remplacés par de nouveaux étuis à lentilles au minimum tous les 3 mois.

Produit	Composition
Solution de décontamination Oxysept 1 Etape/Comfort	Peroxyde d'hydrogène – 3,0 %
Comprimés de neutralisation Oxysept 1 Etape/Comfort	Catalase (0,1mg/comprimé)
Comprimés de déprotéinisation Ultrazyme	Subtilisine A (0,4 mg/comprimé)
Solution saline LENS PLUS OcuPure	Conservateur OcuPure – 0,005 %
Etui Oxysept 1 Etape/Comfort spécialement conçu pour le système	
REMARQUE: La solution saline LENS PLUS OcuPure, l'étui Oxysept 1 Etape/Comfort et les comprimés de déprotéinisation Ultrazyme ne sont pas inclus dans toutes les références de packs mais peuvent être achetés séparément.	

#### Symboles

**STERILE A** Stérile-Technique aseptique

Consulter les instructions d'utilisation

Ne pas mettre directement dans l'œil

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Fabricant

**LOT** Numéro de lot

Date limite d'utilisation

