

Instructions d'utilisation

Progent

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les conservez pour pouvoir les consulter ultérieurement

Produit distribué par :

Menicon SAS, 104, rue Martre 92583 Clichy Cedex,

France Tél : 01 41 40 19 19

Email : serviceclients@menicon.fr

Fax : 01 41 40 19 20

www.menicon.fr



Progent

SP-Intensivreiniger

**PROTEIN REMOVER
AND DISINFECTING SOLUTION**
for all rigid gas permeable lenses.

**PROTEINENTFERNER
UND DESINFEKTIONS-LÖSUNG**
für alle formstabilen
sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen.

**PROTEINEVERWIJDERENDE EN
DESINFECTERENDE VLOEISTOF**
voor alle vormvaste contactlenzen.

**SOLUTION DE DÉPROTÉINISATION
ET DÉSINFECTION**
pour toutes les lentilles rigides perméables.

**SOLUCIÓN DE DESPROTEINIZACIÓN
Y DESINFECCIÓN**
para todas las lentes de contacto rígidas permeables.

**SOLUÇÃO DE DESPROTEINIZAÇÃO
E DESINFECÇÃO**
para todas as lentes rígidas permeáveis.

**SOLUZIONE PER LA RIMOZIONE
DELLE PROTEINE E LLA DISINFEZIONE**
per tutte le lenti a contatto rigide gaspermeabili.

 **Manufacturer / Hersteller / Fabrikant :**

Menicon Pharma

Bd Sébastien Brant

Parc d'Innovation - F-67400 Illkirch Graffenstaden

Distributors / Vertriebsgesellschaft / Distributeur

Menicon S.A.S. - 104 rue Martre - F - 92583 Clichy Cedex

Menicon GmbH - Odenwaldring 44, D 63069 Offenbach

NKL Contactlinsen - Postbus 47 - **NL - 7800 AA Emmen**

Cette notice d'instruction contient des informations importantes.
Veuillez la lire attentivement et la conserver pour référence ultérieure.

PROGENT

FR Nettoyant intensif

INDICATIONS

Solution de déprotéinisation et désinfection pour toutes les lentilles rigides perméables.

MODE D'EMPLOI

- 1 Nettoyer vos lentilles soigneusement avec votre solution de nettoyage habituelle. Placer les lentilles dans leurs supports respectifs fixés au couvercle de l'étui Progent : R = droite, L = gauche, pour le nettoyage intensif.
- 2 Ouvrir les doses avec précaution en position verticale. Tourner doucement et délicatement l'extrémité en veillant à ne pas presser la dose ni à toucher l'ouverture avec les doigts.
- 3 Placer l'extrémité de la dose à l'intérieur de l'étui Progent et verser doucement la solution A puis la solution B pour éviter toutes éclaboussures de solution.
- 4 Fermer l'étui Progent et agiter doucement plusieurs fois de manière à bien mélanger les solutions A et B.
- 5 Laisser les lentilles dans la solution pendant 30 minutes maximum.
- 6 Retirer le couvercle de l'étui Progent et vider son contenu. Rincer abondamment les lentilles sur leurs supports avec une solution de rinçage habituelle.
- 7 Procéder ensuite au nettoyage des lentilles avec la solution habituelle puis les rincer. Les lentilles sont alors prêtes à être posées sur les yeux ou conservées dans leur étui.
- 8 Rincer l'étui Progent et le couvercle avec une solution de rinçage habituelle et les laisser sécher à l'air libre.

ATTENTION



Ne pas instiller le produit dans les yeux, dans le nez et la bouche. En cas de projection accidentelle, procéder immédiatement à un rinçage oculaire très abondant avec de l'eau et consulter rapidement votre ophtalmologiste.

- Le rinçage abondant des lentilles avec la solution de rinçage habituelle est une étape indispensable après trempage dans la solution Progent.
- METTRE LE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le temps de trempage des lentilles ne doit pas dépasser 30 minutes. Au delà, cela ne porterait pas atteinte à la qualité des lentilles, mais risquerait de les décolorer.
- **Important : ne pas avaler.**
- A utiliser de façon hebdomadaire en port journalier (et au retrait des lentilles en port continu).
- Ne pas utiliser la solution A ou B séparément.
- Doses à usage unique. Après chaque utilisation, la solution A+B et les doses doivent être jetées. ②
- Conserver à température ambiante (15-25°C).
- Eviter le contact avec la peau et les projections sur les vêtements : risque de blanchiment.
- Ne pas utiliser après la date de péremption (imprimée sur les doses).
- Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.

CONTRE-INDICATIONS

- **Ne pas utiliser pour les lentilles souples.**
- Antécédents allergiques à l'un des composants.

EFFETS SECONDAIRES

En cas d'inconfort ou d'irritation persistants, retirer les lentilles de contact, arrêter d'utiliser le produit et consulter un ophtalmologiste.

DÉSINFECTION DES LENTILLES

Progent présente une activité désinfectante vis-à-vis des microorganismes (bactéries, champignons, virus, amibes) en 5 minutes de trempage.

PRÉSENTATION

Progent est disponible en boîte de 5 doses A et B avec un étui Progent et en coffret départ.

COMPOSITION


Solution A : NaClO 20.3 mg, eau purifiée qsp 5 ml/dose.

Solution B : KBr 30.75 mg, eau purifiée qsp 5 ml/dose.

Cette notice d'instruction contient des informations importantes.
Veuillez la lire attentivement et la conserver pour référence ultérieure

Progent

FR Nettoyant intensif

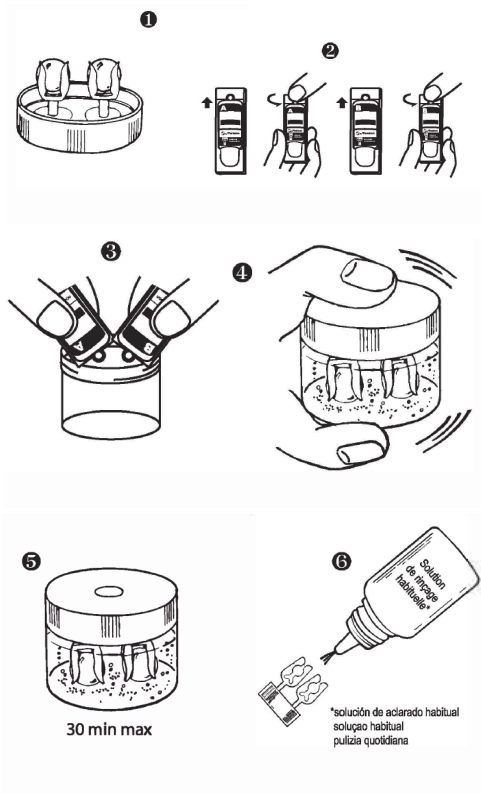

Fabricant / Fabricante / Fabricante / Produttore :

Menicon Pharma S.A.S. : - B d Sébastien Brant
Parc d'Innovation - F-67400 Illkirch Graffenstaden

Distributeurs / Distribuidores / Distribuidores / Distributori :

Menicon SAS - 104 rue Martre - F -92583 Clichy Cedex

Menicon GmbH - Jakob-Latscha-Straße 3 - 60314 Frankfurt

NKL Contactlenzen - Postbus 47 - NL - 7800 AA Emmen

David Thomas Contact Lenses Ltd - Gatelodge Close Round Spinney
Northampton NN3 8 RJ.

CE 0483

STERILE A

Stérile par procédé aseptique (filtration)